



## KÄYTTÖOHJE

### Calluspeeling ultra - Hoitoliuskat kovettumien poistoon, (Medical Device)

**Käyttö:** Aseta hoitoliuskat kovettumien päälle, kelmuta jalat ilmatiiviisti ja anna vaikuttaa 15 minuutin ajan. Poista kovettumat lastan avulla, sen jälkeen raspaa jalat. Lopuksi pyyhi jalat vedellä ja miedolla pesuaineella.

**VAROITUS:** sisältää AHA-happoja ja natriumhydroksidia (lipeä), vältettävä tuotteen joutumista silmiin. Voi aiheuttaa sokeutumisen. Ei lasten ulottuville. **Älä käytä ärsyyntyneelle tai rikkiäiselle iholle!** Jos pykimien/halkeamien pohjalla iho on ehjä, voidaan hoito tehdä.

**Jos ärsytystä ilmenee älä jatka hoitoa!** Poista tuote iholta heti ja pese jalat vedellä ja miedolla pesuaineella ja levitä reilu kerros Daily Care Foot Cream-voidetta. Jos ärsytys jatkuu ohjaa asiakas lääkärille. Ärsytys voi johtua allergiasta tai erityisen herkästä ihosta.

**Diabetes asiakkaiden hoidossa kysy tarvittaessa neuvoa asiantuntijalta.** Hoito sopii diabeetikolle, kunhan jalat eivät ole liian huonossa kunnossa. Hoitoa ei tule tehdä, jos iho on äärimmäisen herkkä tai vaurioitunut.

Älä laita suuhun tai limakalvoille. Älä käytä hoidossa veistä, poraa tai lääkkeitä. Käytä hanskoja hoidon aikana. **Hoitoliuskat tulee asettaa vain kovettuma-alueille; ärsytystä voi ilmetä, jos ne ovat terveellä iholla.** Liuskat ovat kertakäyttöiset, älä käytä uudelleen. Käytä tuotetta korkeintaan kerran viikossa.

Älä peitä kynsiä hoitoliuskoilla. Kynsiä ja kynsinauhoja voi pehmentää pelkällä pussin pohjalle jäävällä nesteellä, mutta ilman hauteita / kääreitä. Muista pestä pois lopuksi.

Känsät voi poistaa varoen veitsellä, mutta vasta Calluspeeling hoidon päätteeksi; jalkojen pesun jälkeen ennen loppuvoidetta. Muuten Calluspeeling hoidossa ei tule käyttää poraa eikä veistä!

Varsinaista jalkakylpyä ei tule yhdistää Calluspeeling hoitoon. Hoidon lopussa jalat pestään, jotta kuorivat aineet saadaan pois iholta.

#### **Calluspad-hoitoliuskojen INCI:**

Aqua, Sodium Hydroxide, Glycerin, Carbomer, Alcohol Denat., Xanthan Gum, Lactic Acid, Glycolic Acid

Pakkauksen sisältö: 4 käyttövalmista hoitoliuskaa

Valmistaja:

MAVEX SA, Via Selva Grande 10, 6942 Savosa, Switzerland, [www.mavexsa.com](http://www.mavexsa.com)

Maahantuojat: **Maarit Leikoski Oy**, Lapinrinne 2, 00180 Helsinki, p. 010 420 3051, [info@maaritleikoski.fi](mailto:info@maaritleikoski.fi), [www.maaritleikoski.fi](http://www.maaritleikoski.fi)